

Instrukcja używania
Instructions for use

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO

KNEE JOINT BRACE

Numer katalogowy / Catalogue Number:	PHAI02
Basic UDI-DI:	59017804PHAI02HY



Producent / Manufacturer:

Mdh sp. Z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Wydanie 27.10.2021
Edition 27.10.2021

Qmed[®]
BY MEYRA



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Stabilizator stawu kolanowego

Stabilizator stawu kolanowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów sportowych – chroni i usztywnia staw kolanowy, jak i do celów rehabilitacyjnych – pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu kolanowego.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- Przeciążenie wynikające z obciążeń wysiłkowych.
- Zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu.
- Profilaktyka występowania urazu.
- Wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA:

- Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Stosowanie opaski skonsultować z lekarzem.

KONSERWACJA:

Prać ręcznie w temp. 40°C z dodatkiem delikatnych środków piorących np.: dla włókien syntetycznych. Nie prasować, nie chlorować, suszyć w stanie luźnym.



WYRÓB WIELOKROTNEGO UŻYCIA

DOPASOWANIE ROZMIARU:

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu kolanowego (cm)	27 – 33	30 – 38	39 – 45	46 - 49

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

INSTRUCTIONS FOR USE

Knee joint brace

TO BE USED FOR INJURIES

The Qmed Pharma knee brace is suitable for both sports purposes - it protects and immobilizes the knee joint, and for rehabilitation purposes - it helps in the treatment of damaged or strained- knee joint.

INDICATIONS FOR USE:

- Strain resulting from exercise loads.
- Reduction of pain by compressing the joint.
- Prevention of injuries.
- Strengthening of the ligamentous system of the knee joint.

HOW TO PUT ON THE BRACES:

- Pull the brace over the knee joint.
- Do not put it directly onto wounds or damaged skin.
- Consult a physician regarding the use of the brace.

MAINTENANCE:

Hand wash at 40°C with mild detergents, e.g. for synthetic fibres. Do not iron, do not chlorinate, dry loose.



REUSABLE PRODUCT.

SIZE SELECTION:

Size	S	M	L	XL
Knee joint circumference (cm)	27 – 33	30 – 38	39 – 45	46 - 49

THE FINAL DECISION REGARDING THE APPLICATION AND SELECTION OF EQUIPMENT IS MADE BY A SPECIALIST PHYSICIAN.