

Konserwacja:

Elementy ramy czyścić wilgotną ściereczką. Elementy wysięćki przetrzeć wilgotną szmatką lub prać ręcznie w bardzo łagodnych środkach piorących w temperaturze do 35°C, nie chlorować, nie prać chemicznie, nie wykrcać, nie odwirowywać, wycisnąć delikatnie przed suszeniem. Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła. Suszyć w postaci rozłożonej. Nie prasować.

! Uwaga:

Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem bakterii. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał, z którego wykonano wyrób. OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.


 **MDH**[®]
Sprzęt Medyczny

Dystrybutor:

MDH Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 636 52 21
www.qmedbymejra.pl



Producent/Manufacturer:

 Ovation Medical
5155 Clareton Dr.
Agoura Hills, CA. 91301
800 403-6466
www.ovationmed.com

Wydanie: 17.11.2021

Edition: 17.11.2021

Auszgabe: 17.11.2021

Instrukcja używania



 Ovation Medical[®]
The Game Changer[™] Gen2
Premium Universal OA Knee Brace 

PL

GAME CHANGER GEN 2 ORTEZA OA

NUMER KATALOGOWY:
(ORTEZA PRAWA) OV 49002-2
(ORTEZA LEWA) OV 49001-2

Zastosowanie:

Game Changer to produkt, który stosowany jest podczas jednoprzędziowych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego, podczas doleczania pooperacyjnego lub okresu rehabilitacji wymagających jednoprzędziowego odciążenia stawu, korekcji osi stawu i jego stabilizacji, jest również wskazany dla pacjentów podejmujących aktywności o małej i średniej intensywności.

Cechy produktu:

Rama ortezy jest lekka, perforowana oraz elastyczna, podkładki z nowoczesnej dzianiny zapewniają stabilne umiejscowienie ortezy (system antymigracyjny dzięki poduszkom z silikonem), orteza wyposażona jest w system jednorazowego dopasowywania taśm stabilizujących, wygodne w użytkowaniu zapięcia, powtarzalny, łatwo mierzalny system aplikacji siły korygującej, płaski i lekki zamek z blokadą przeprostu, wersja na prawą i lewą kończynę.

Rozmiar:

Uniwersalny

Przeciwwskazania:


Zaawansowane zmiany obejmujące oba przedziały stawu kolanowego, stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego, rany, owrzodzenia, zmiany skórne w obrębie działania ortezy. Należy zachować szczególną ostrożność stosując ortezę u pacjentów z zaburzeniami czucia, zaburzeniami krążenia obwodowego, schorzeniami naczyń obwodowych oraz u diabetyków.

**Sposób zakładania:**

Odepnij wszystkie klamry od ramy ortezy poprzez uniesienie mechanizmu zatrzaskowego.



Umieść ortezę na stawie kolanowym ugiętym w 45 stopniach. Środek zegara powinien znajdować się powyżej rzepki (jak na zdjęciu).

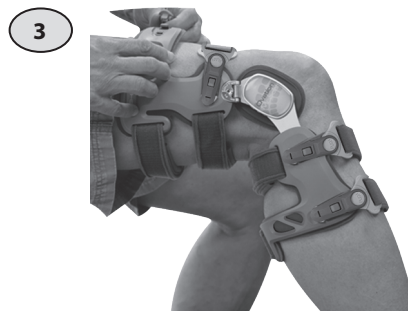

Zapnij ponownie wszystkie klamry do ramy ortezy w kolejności 1-4. (Opis dopasowania długości pasków znajduje się w dalszej części instrukcji).

4



Zweryfikuj ostateczne położenie ortezy na kończynie poprzez dociągnięcie pasków.

Budowa ortezy: