

MATRIX MEDIAL T

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Instrukcje dopasowania

1. Wyjąć wkładkę, a ortezę MATRIX MEDIAL T włożyć do buta.
2. Wkładkę umieścić na górze podnóżka. Wkładka może być wykonana na zamówienie, standardowa lub dostarczona z obuwem użytkownika.
3. Poluzować sznurowadła, a stopę włożyć do buta i zapiąć paski.
4. Sprawdzić dopasowanie.

PIĘTA DOTYKA PODŁOŻA

POŚREDNIA POZYCJA

PALCE ODERWANE OD PODŁOŻA



- Wykonać kilka próbnych kroków. Upewnić się, że staw kolanowy nie jest zbyt mocno wyprostowany.
 - Sprawdzić, czy obuwie nie jest zdeformowane.
 - Upewnić się, że pacjent znajduje się w komfortowej pozycji i żadne miejsca nie są uciskane, ponieważ to może powodować ból lub powstawanie owrzodzeń.
5. W razie potrzeby, ponownie dopasować ortezę.
- Podnóżek: **MATRIX MEDIAL T** posiada podnóżek z możliwością przycinania, umożliwiając dopasowanie do różnych rozmiarów obuwia. **MATRIX MEDIAL T** można personalizować poprzez szlifowanie, co umożliwia dopasowanie do buta pacjenta. Należy stosować odpowiedni sprzęt do ekstrakcji i ochrony indywidualnej.
 - Paski: Paski można przyciąć do pożądanej długości.
 - Wkładka: W razie potrzeby, wkładkę można przymocować do podnóżka MATRIX MEDIAL T, aby ją unieruchomić.



SZLIFOWANIE I

MATRIX Family - wytyczne dotyczące wyrobu

Wyroby MATRIX są wytwarzane z zaawansowanych materiałów kompozytowych, i zostały zaprojektowane w sposób wspierający prawidłowy sposób chodzenia u pacjentów z opadającą stopą, a także mogą wykorzystywane w związku z innymi biomechanicznymi deficytami.

Wybór obuwia: dla optymalnej wydajności oraz trwałości wyrobów z serii MATRIX, obuwie powinno mieć mocny zapiętek, 10 mm drop, antypoślizgową, elastyczną podeszwę i wystarczająco dużo miejsca, aby zmieścić ortezę. Nie należy nosić wysokich butów oraz szpilek. Wyrobów MATRIX nie wolno nosić bez obuwia.



Wyrób NIE może być wykorzystywany podczas biegania, kucania, klękania, wchodzenia po drabinie lub po schodach, gdyż podnózek będzie *nierównomiernie* obciążony.

Konserwacja ortozy MATRIX MEDIAL T

Wyroby MATRIX powinny być stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wyrób należy regularnie czyścić, przecierając wilgotną ściereczką, a także prac ręcznie materiał pokrywający wnętrze ortozy oraz paski.

W przypadku pojawienia się nadmiernego zaczerwienienia, otarć lub podrażnień, natychmiast przerwać użytkowanie.

Ortezę MATRIX MEDIAL T proszę utylizować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami oraz regulacjami.

Wydanie 15.09.2021

Dystrybutor

Mdh sp. z o.o.
Ul. Maratońska 104,
90-349 Łódź, Polska
Tel. +48 42 636 81 44
e-mail: ortopedia@mdh.pl



Trulife Limited
41 Amos Road, Sheffield
S9 1BX, Wielka Brytania
www.trulife.com

