

Instrukcja używania
Instructions for use

STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO

KNEE JOINT BRACE

Numer katalogowy / Catalogue Number:	PHAF01
Basic UDI-DI:	59017804PHAF01HF



Producent / Manufacturer:

Mdh sp. z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Wydanie 27.10.2021
Edition 27.10.2021

Qmed[®]
BY MEYRA



INSTRUKCJA UŻYWANIA

Stabilizator stawu łokciowego

Stabilizator stawu łokciowego marki Qmed Pharma nadaje się zarówno do celów sportowych – chroni i usztywnia staw łokciowy, jak i do celów rehabilitacyjnych – pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu łokciowego.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

- Przeciążenie wynikające z obciążeń wysiłkowych.
- Zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu.
- Profilaktyka występowania urazu.
- Wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu łokciowego.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA:

- Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu łokciowego.
- Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.
- Stosowanie opaski skonsultować z lekarzem.

KONSERWACJA:

Prać ręcznie w temp. 40°C z dodatkiem delikatnych środków piorących np.: dla włókien syntetycznych. Nie prasować, nie chlorować, suszyć w stanie luźnym.



WYRÓB WIELOKROTNEGO UŻYCIA

DOPASOWANIE ROZMIARU:

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu łokciowego (cm)	19 – 21	22 – 24	25 – 28	28 - 32

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

INSTRUCTIONS FOR USE

Elbow joint brace

TO BE USED FOR INJURIES

The Qmed Pharma elbow brace is suitable for both sports purposes - it protects and immobilizes the elbow joint, and for rehabilitation purposes - it helps in the treatment of damaged or strained elbow joint.

INDICATIONS FOR USE:

- Strain resulting from exercise loads.
- Reduction of pain by compressing the joint.
- Prevention of injuries.
- Strengthening of the ligamentous system of the elbow joint.

HOW TO PUT ON THE BRACES:

- Pull the brace over the elbow joint.
- Do not put it directly onto wounds or damaged skin.
- Consult a physician regarding the use of the brace.

MAINTENANCE:

Hand wash at 40°C with mild detergents, e.g. for synthetic fibres. Do not iron, do not chlorinate, dry loose.



REUSABLE PRODUCT.

SIZE SELECTION:

Size	S	M	L	XL
Elbow joint circumference (cm)	19 – 21	22 – 24	25 – 28	28 - 32

THE FINAL DECISION REGARDING THE APPLICATION AND SELECTION OF EQUIPMENT IS MADE BY A SPECIALIST PHYSICIAN.