

Instrukcja używania

GORSET ORTOPEDYCZNY HX-3

GORSET ORTOPEDYCZNY TYPU JEWETTA

Numer katalogowy / Catalogue Number:	DRQB0D
Basic UDI-DI:	59017804DRQBQQ



Qmed[®]
BY MEYRA



Producent:

Mdh sp. z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedbymejra.pl

Wydanie 15.09.2021

INSTRUKCJA UŻYWANIA

GORSET ORTOPEDYCZNY HX-3 - Gorset ortopedyczny typu Jewetta

WSKAZANIA:

- Stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (od Th6-L-S) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych,
- reklinacja trzonów kręgowych,
- unieruchomienie po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

PRZECIWWSKAZANIA:

- Niestabilne złamania i zwichnięcia kręgów wymagające leczenia operacyjnego,
- uszkodzenia kręgów znacznego stopnia o etiologii zapalnej i nowotworowej,
- zmiany zniekształcające kręgowi i wypadnięcie jądra miażdżystego wymagające innego unieruchomienia,
- stany po operacjach na kręgosłupie, zwłaszcza z użyciem przeszczepów kostnych.

OPIS PRODUKTU:

- Lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego.

SPOSÓB REGULACJI I DOPASOWANIA GORSETU:

- Gorset powinien być dobierany, regulowany i zakładany przez wykwalifikowany personel medyczny.
- Należy wybrać rozmiar gorsetu zgodnie z tabelą rozmiarową znajdującą się poniżej.
- Indywidualne dopasowanie wysokości gorsetu, jego szerokości w części piersiowej oraz wysokości położenia peloty tylnej umożliwiają wkrety. Ich odkręcenie pozwala na regulację wymienionych parametrów.
- Wysokość i szerokość w części piersiowej powinna być wyregulowana symetrycznie.
- Położenie peloty tylnej (stabilizującej) powinno być symetryczne.
- Wszystkich regulacji należy dokonywać przed zaopatrzeniem pacjenta.
- Gorset powinien być zakładany na bawełnianą koszulkę.
- Gorset należy zakładać w pozycji leżącej. Rama gorsetu powinna być umiejscowiona tak, aby pelota mostkowa opierała się na rękojęści mostka, a pelota dolna powinna opierać się na podbrzuszu (powyżej górnej krawędzi spojenia łonowego).
- Ustawienie peloty tylnej powinno być dostosowane do wysokości uszkodzenia oraz wskazań lekarskich.
- Istnieje możliwość ustawienia pionowej peloty tylnej dla zwiększenia płaszczyzny stabilizacji. W tym celu należy wyjąć taśmę mocującą pelotę i przełożyć ją ponownie przez otwory znajdujące się w pelocie tylnej.
- Długość taśmy powinna zostać wyregulowana tak, aby zapewniać właściwe przyleganie peloty tylnej – odpowiednią stabilizację.

KONSERWACJA:

Elementy wykonane z ekoskóry powinny być czyszczone wilgotną szmatką z użyciem łagodnych detergentów (np. mydła). Nie stosować silnych detergentów i środków wybielających.



UWAGA!



Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewyplukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.

Wyrób nie jest ognioodporny. Nie stosować w bezpośredniej bliskości otwartych źródeł ognia.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA



Rozmiar	S	M	L
Pomiar od rękojęści mostka do spojenia łonowego (cm)	37 - 44	41 - 48	45 - 52