

Instrukcja używania
Instructions for use

TEMBLAK UNIWERSALNY

UNIVERSAL SLING

Numer katalogowy / Catalogue Number:	PHAG01
Basic UDI-DI:	59017804PHAG01HL



Producent / Manufacturer:

Mdh sp. z o.o.,
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedbymeysra.pl

Wydanie 15.09.2021
Edition 15.09.2021

Qmed[®]
BYMEYRA

CE

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Temblak uniwersalny

Temblak uniwersalny marki Qmed Pharma przeznaczony jest do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku konieczności utrzymania kończyny w jednej pozycji. Temblak jest lekki i wygodny. Nawet podczas całodziennego noszenia nie wywołuje dyskomfortu. Produkt jest przydatny w szczególności po zdjęciu gipsu jako opatrunek doraźny.

WSKAZANIA:

Temblak podtrzymuje ramię przenosząc ciężar na plecy w przypadku skręceń, złamań lub do odciążenia po zabiegach operacyjnych. Pomaga utrzymać ramię w neutralnej pozycji.

SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Ułożyć przedramię w tutorze temblaka, a następnie przełożyć pas podtrzymujący przez głowę.

KONSERWACJA:

Prać w zimnej wodzie, suszyć na sucho. Nie używać wybielaczy. Nie prasować. Nie czyścić na sucho.



DOPASOWANIE ROZMIARU:

Należy zmierzyć długość przedramienia.

Rozmiar	S	M	L	XL
Długość przedramienia (cm)	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 - 40



UWAGA! Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę. Skóra w obrębie ortozy powinna być czysta, sucha, bez maści, kremów itp.

Wyrób wielokrotnego użycia.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

INSTRUCTIONS FOR USE

Universal sling

The Qmed Pharma universal sling is designed for supporting and partially immobilising the upper limb if it needs to be kept in one position. Sling is lightweight and comfortable. It does not cause discomfort even during all-day use. The product is especially useful after the removal of a cast as a temporary dressing.

INDICATIONS FOR USE:

The sling supports the arm by transferring load to the back in sprains and fractures. It can also be used for unburdening the limb post surgeries. It helps keep the arm in a neutral position.

APPLICATION:

Place the forearm in the sling and then pass the supporting belt over your head.

MAINTENANCE:

Wash in cold water, leave to air dry. Do not bleach. Do not iron. Do not dry clean.



SIZE SELECTION:

Measure your forearm length

Size	S	M	L	XL
Forearm length (cm)	20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 - 40



REMARKS: Do not use directly on wounds or damaged skin. The skin within the orthosis should be clean, dry, without lotions, creams etc.

Reusable product.

THE FINAL DECISION REGARDING THE APPLICATION AND SELECTION OF EQUIPMENT IS MADE BY A SPECIALIST PHYSICIAN.